

やさしさとまごころを安心と快適性にこめて—

# 総合メディカル ニュース

NO.176

令和7年4月16日発行

## 春のおでかけ、その前に

4月に入り日中は暖かい日も増えおでかけの機会も増えてくるかと思えます。

今回は安心・安全なおでかけのために用具の簡単な日常点検ポイントをご紹介します。



### 杖

- ・高さ調節ピン(ポッチ)は正しく調節穴に入っているか?
- ・高さ調節部の止めネジはしっかり締まっているか?
- ・先ゴムは極端にすり減っていないか?



### 歩行器

- ・前後輪キャスターは極端にすり減っていないか?
- ・握りブレーキ・駐車ブレーキは共に正常に効いているか?
- ・折り畳みはスムーズに行えるか?



### 車いす

- ・タイヤの空気は抜けていないか?
- ・タイヤ、キャスターは極端にすり減っていないか?
- ・介助・駐車ブレーキは共に正常に効いているか?
- ・フットサポート(足置き)はバタつかないか?
- ・折り畳みはスムーズに行えるか?

※これらは簡易的な点検であり全てにおいての安全を保証できるものではありません。

ご利用の用具のより高度な点検や調整、また気になる点がありましたら弊社までお気軽にお問い合わせください。

## アンケート実施のお願い

日頃より、弊社福祉用具レンタルをご利用いただきましてありがとうございます。

先月のメディカルニュースにアンケートはがきを同封させていただきました。

多くのご意見を皆様と共有させていただき、より良いサービスの向上に役立てて参ります。

今月からご利用のおお客様の中でご意見ご感想等がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

電話 072-723-9121 FAX 072-723-4033

## わたしのつばやき

梅の花や桜の花の時期も過ぎ、山を歩くと藤の花の咲く季節になりました。私が小学校に入学した時を思い返すと、小学校の校門に咲く桜の花の下で、母親に写真を撮ってもらった事を思い出します。近頃では温暖化が進み、満開の桜が咲く時期が変わり記念写真を撮るのが難しくなったのでは無いかと思えますが、今年は寒の戻りがあり入学式に満開の桜を見ることが出来ましたね。最近の入学式はお父さん、お母さんの二人に手を引かれている姿を見かけます。

4月半ばになると、一年生が大きなランドセルを背負い上級生に導かれ一生懸命頑張って歩いている姿を見られて微笑ましく思います。



やさしさとまごころを安心と快適性にこめて  
**総合メディカル株式会社**

本社 TEL.072-723-9121  
 豊中営業所 TEL.06-4865-3077

<https://www.sougoumedical.jp>

総合メディカル 箕面

検索



(協力企業 株式会社あいであい)