

リフト使用に関するの留意事項

1. 門型リフトはベッドの真ん中にくるように設置してください。頭側寄り、もしくは足元寄りに設置して利用者様を吊り上げた場合、リフトが倒れる可能性があります。



2. 車いすに座っている状態から吊り上げる時は、車いすのブレーキを解除してください。
⇒吊り上げた時に利用者が揺れることを防止できます。



駐車ブレーキ解除

3. 床走行リフトのブレーキは解除した状態で操作してください。




ブレーキ解除

4. 吊り具(スリングシート)は、正しく装着しないと大事故に繋がりますので、使用方法は必ず守ってください。




<バスリフト>


1. バスリフトは電池で動きます。必ず充電してご使用ください。

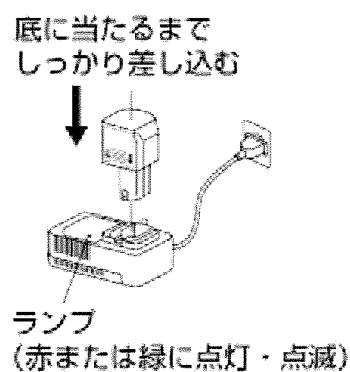


2. リモコンボタンを押していない時に「電池残量警告ランプ」が点灯する場合は必ず充電してください。

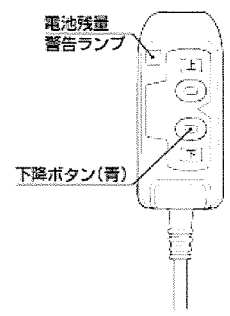


3. バスリフトは4本のワイヤーのたるみを検知しています。下降時に姿勢が傾いたりして4本のワイヤーへの荷重が不均一になってワイヤーがたるむと下降を停止します。
①シート中央にお座りください。 ②上半身が傾かないようにお座りください。

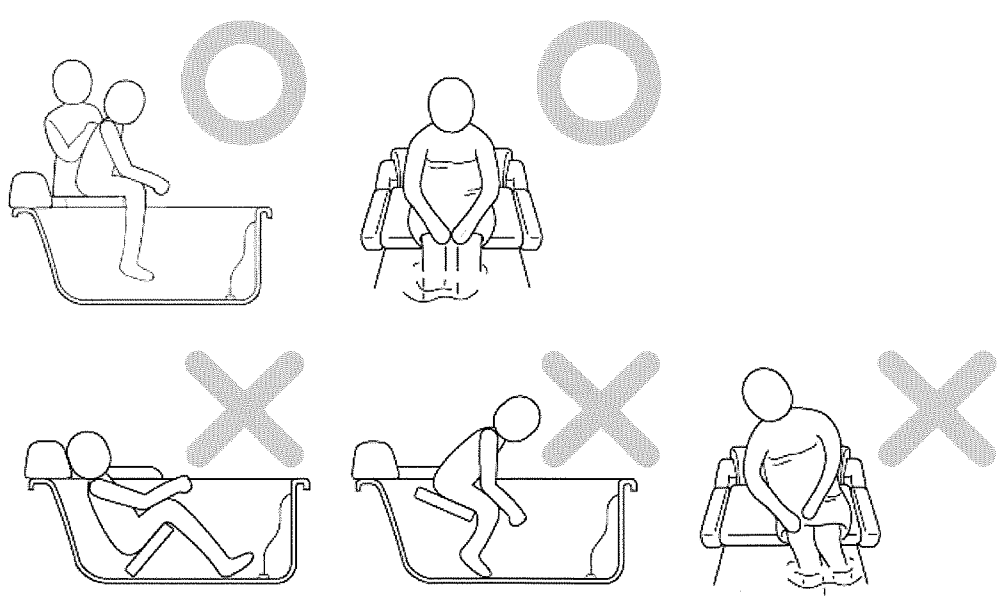

4. バスリフトを使用中は、シートを握らないでください。

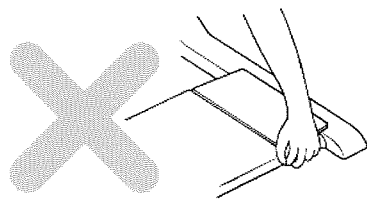

5. バスリフトを使用中は、ワイヤーを握らないでください。

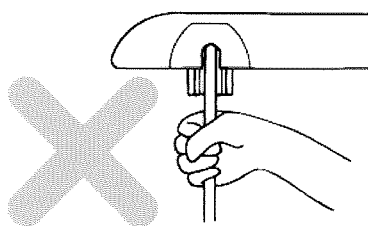

6. 充電してもすぐに電池の警告ランプがつくときは、「リフレッシュ充電」を行ってください。

※詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

